


介助シート『ユニバーサルシート横型 US4シリーズ』

保存版

介助シート『ユニバーサルシート横型 US4シリーズ』 日常点検・定期点検マニュアル

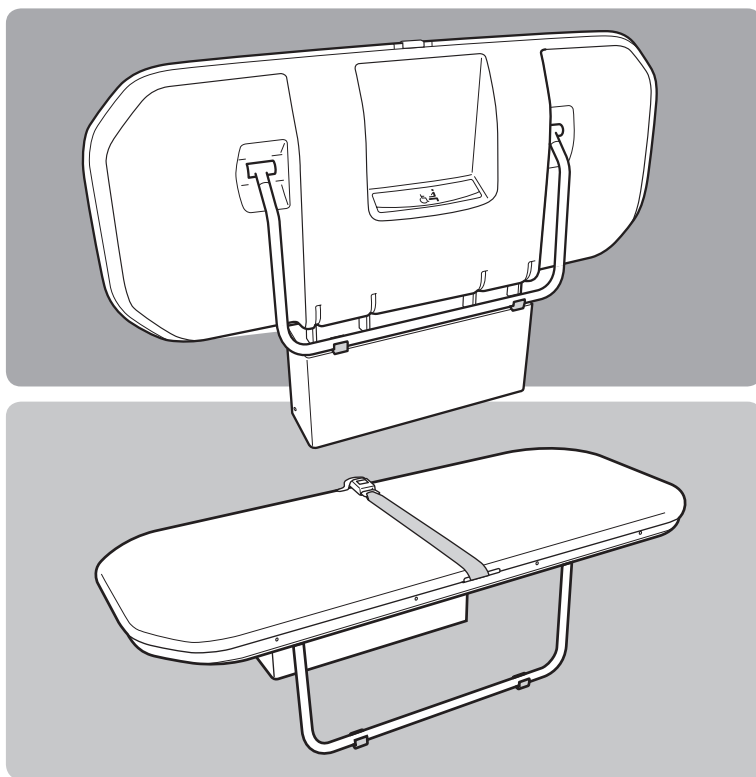

【施工担当の方へ】

施工完了時の点検は日常点検と同じです。製品の取り付けが完了しましたら、3～4ページの**2**日常点検を参照の上、必ず点検してください。

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ(www.combiwith.co.jp)からもダウンロード(PDF)できます。ご活用の程、お願いいたします。

はじめに


本書は、介助シート『ユニバーサルシート横型 US4シリーズ』を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い、毎日もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を必ず正しく実施してください。取付完了後は必ず日常点検に従った点検を実施してください。

目 次

1.各部の名称P.2	4.部品交換P.8
2.日常点検P.3	5.その他P.10
3.定期点検P.5		

1 各部の名称

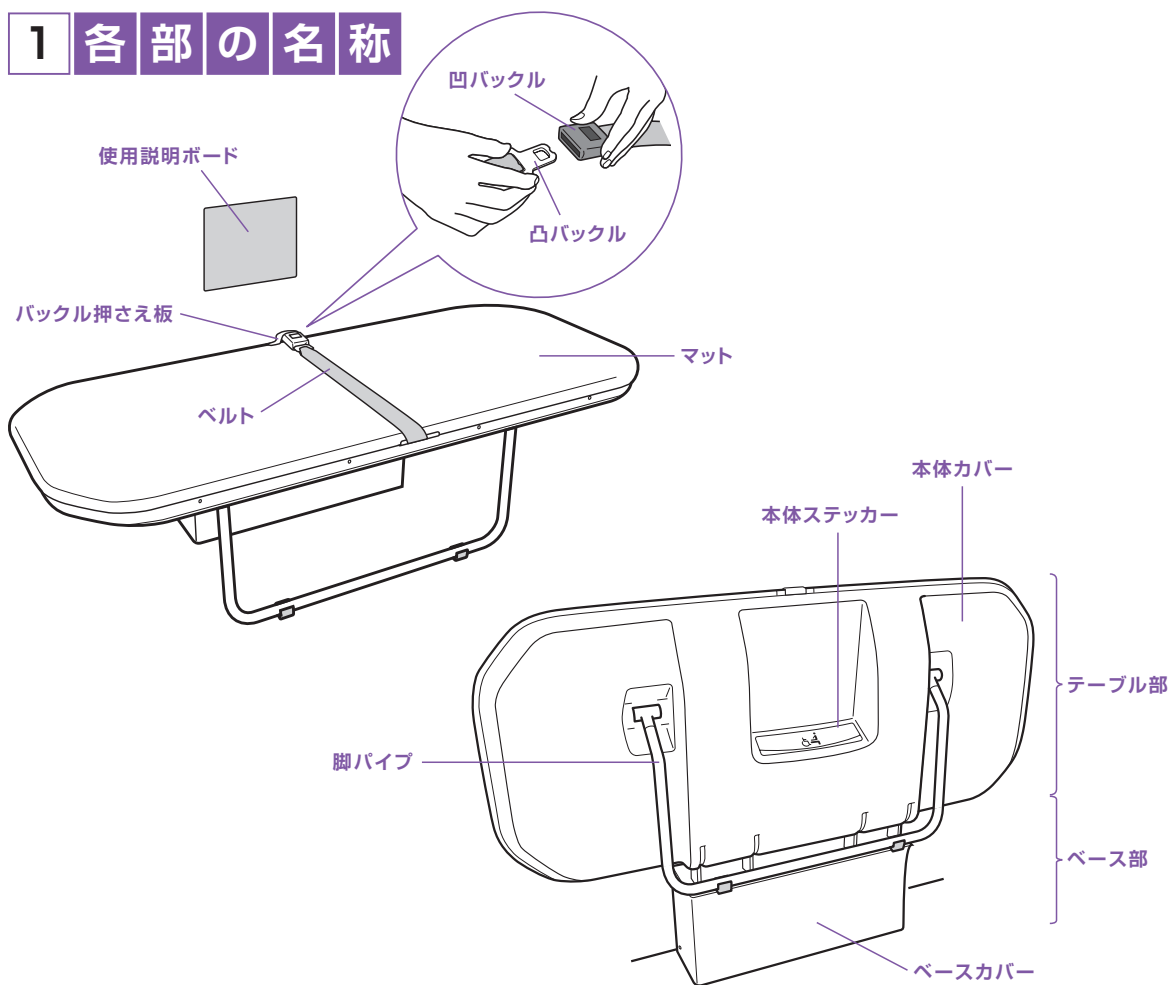

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は通常の使用で7年を想定しておりますので、設置後7年を経過した製品につきましては製品のお取り替えをお願いいたします。補修部品の保管期間は、製品の生産終了後5年間です。

2 日常点検


点検の際は最終ページの『日常点検チェックシート』をご利用ください。

日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および触感で行う点検です。工具は使用しません。

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、裏表紙に記載のコンビウィズ(株)サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

外観の確認


- ①部品のはずれがないことを確認。
- ②テーブル部にガタつきがないことを、揺すって確認。

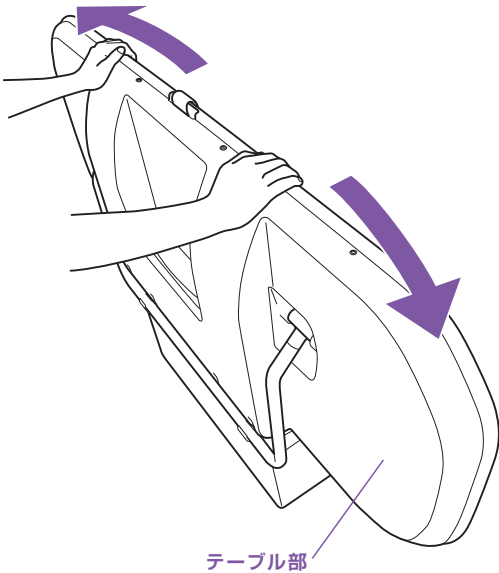

- ③傷・割れなどがいないこと。

本体の開閉動作の確認

- ①テーブル部にガタつきがないことを左右に揺すって確認。
- ②テーブル部を持って開閉がスムーズであることを確認。
- ③テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位置に戻ることを確認。

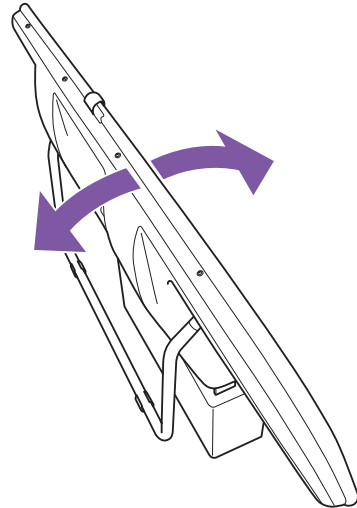


- ④テーブル部を半分程度開いた際ゆっくりと開くことを確認。

ベルト、バックルの確認

- ①バックルに傷・割れ・ガタつきなどがいないこと。
- ②ベルトのほつれ、損傷がないこと。
- ③バックルをカチッと音がするまで差し込み、ベルトを引っばってはずれないこと。
- ④バックルのロック・解除が確実にできること。
- ⑤ベルトがねじれなく、スムーズに収納できること。
- ⑥ベルトを勢いよく引くと、それ以上出ないようにベルトがロックすること。

バックルのロック・解除の確認

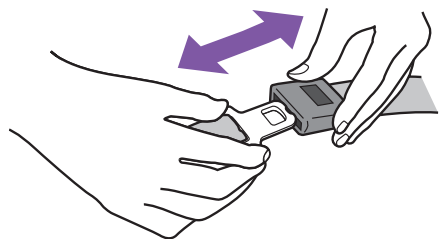


※ベルトに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等がありましたら、ベルト交換をおすすめします。
8ページ④部品交換「ベルトの交換方法」を参照ください。


ステッカー類の確認

正常に貼付され、内容が確認できること(傷、破れ脱落、変色がないこと)
 内容が読めること(汚れ、落書きなどがないこと)


※ステッカーは安全にご使用いただくための警告や使用上の注意が記載されています。

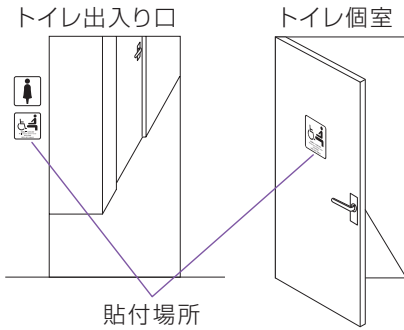


誘導案内ステッカー
 トイレ入口、トイレ個室ドア
 などに貼付

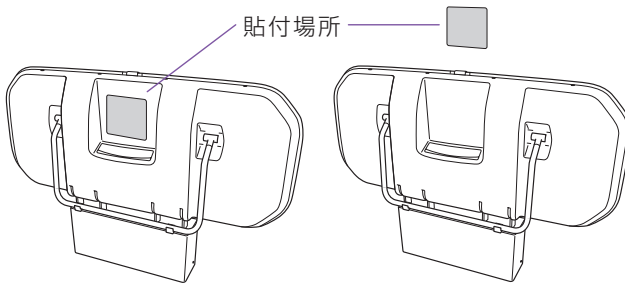

警告ステッカー
 製品近く、かつ見やすい
 位置に貼付
 (壁面または本体カバー)

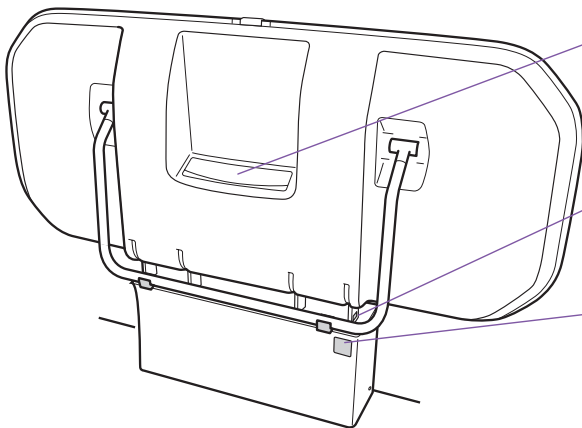

本体ステッカー
 本体カバー正面

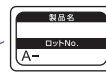

シリアルステッカー
 (下段にロットNo表記)




点検ステッカー
 ベースカバー正面右上



使用説明パネル
 壁面にネジ等で固定

固定ネジの脱落、ゆるみ、はがれ
 がないかを確認。

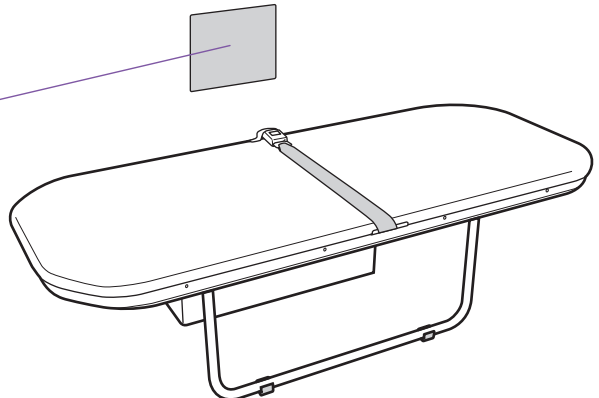

3 定期点検

点検の際は裏表紙『定期点検チェックシート』をご利用ください。

- 定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検です。
- 定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認してください。

必要工具等

ロックタイト(接着剤)〔当社品番97751340〕、プラスドライバー、スパナ、六角棒スパナ(幅4、幅2.5)各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。


点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、裏表紙に記載のコンビニズ(株)サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

⚠注意

ネジの締め付けは必ず**手動**で行ってください。電動ドライバー等を使用すると、樹脂が破損する場合があります。接着剤が必要なネジには**忘れず**に塗布してください。


①バックルの固定

凹凸のバックルをあわせて固定する。

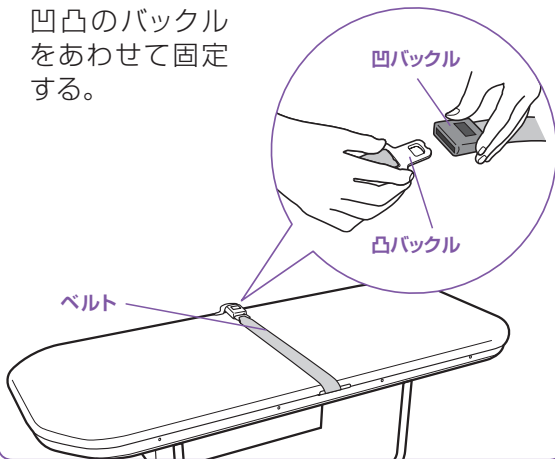

②ベースカバー固定ネジの確認


ベースカバー固定ネジ(4カ所)の脱落がないかを確認後、ネジをはずす。

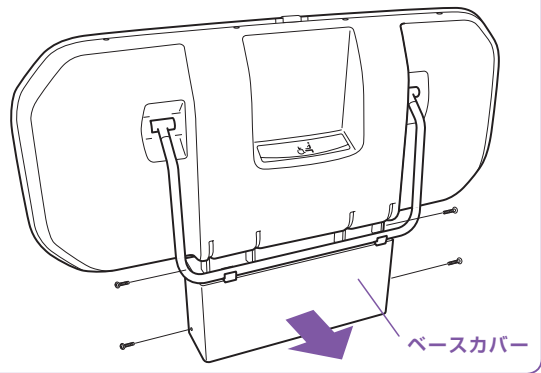


③アンカーボルトの確認

アンカーボルト(4カ所)の脱落、ゆるみがないかを確認。

ベースフレームに錆がないかを確認。

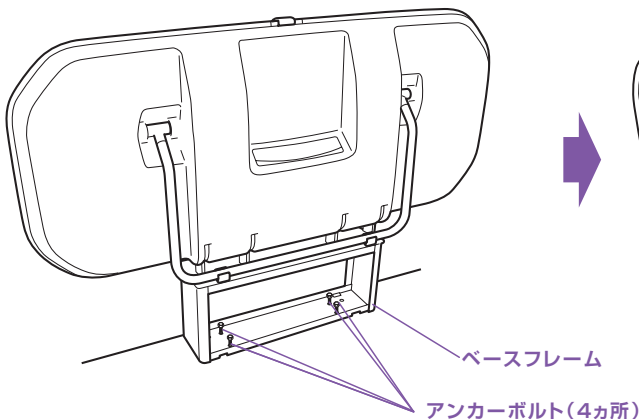


確認後、ベースカバーを取り付けます。

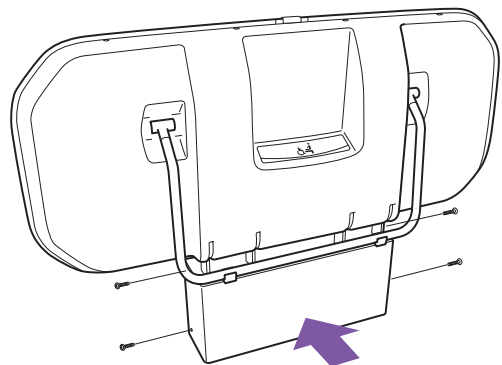

④脚パイプ固定ネジの確認



テーブル部を少し開き、脚パイプ固定ネジ（左右各2本、計4カ所）の脱落がないかを確認後、ネジをはずす。

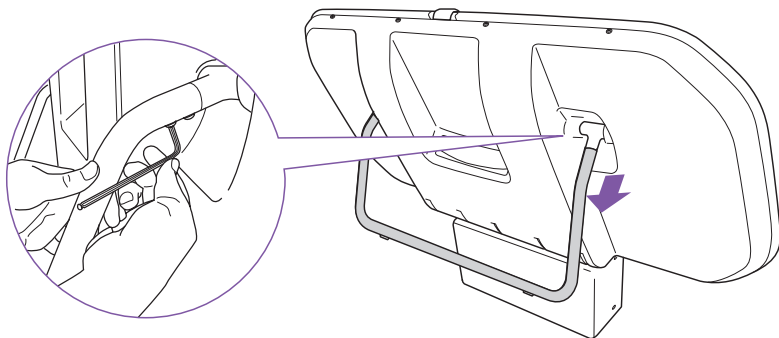

⑤本体カバー固定ネジの確認



テーブル部を閉じ、左右同時に脚パイプを引き抜く。

本体カバー固定ネジ（8カ所）の脱落がないかを確認後、ネジをはずす。

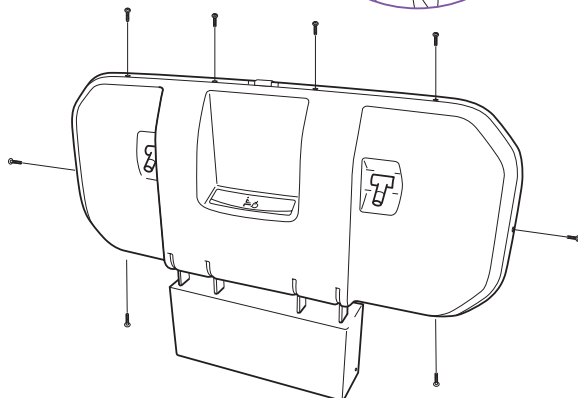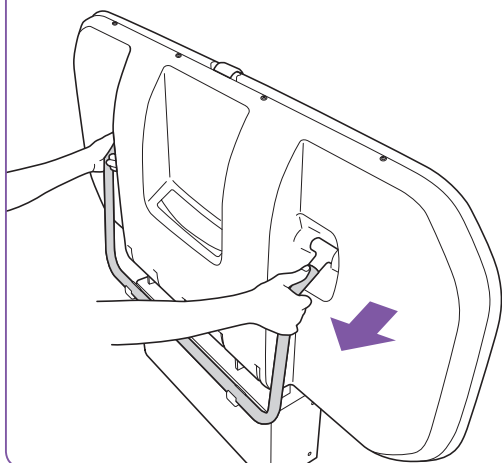

⑥本体カバーの分解



本体カバーをはずす。

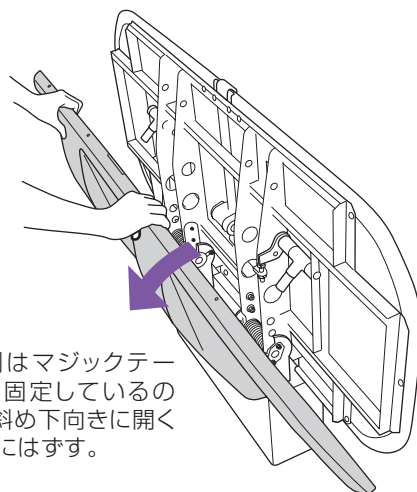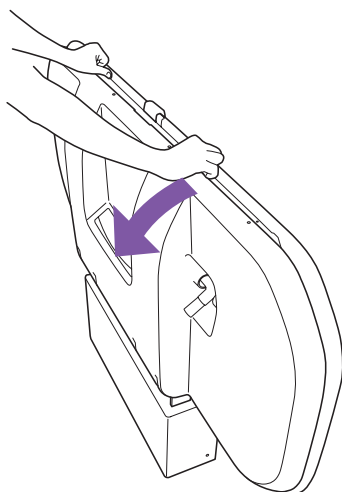

下側はマジックテープで固定しているので、斜め下向きに開くようにはずす。


⑦ベルト巻取りリール、固定ネジの確認

- ①ベルト巻取りリールの動作がスムーズなこと。ベルトを勢いよく引くとロックすること。
- ②ベルト固定ネジの脱落、ゆるみの確認。ゆるみがある場合は、ネジにロックタイト(接着剤)を塗布してしめなおしてください。
- ③マット固定ネジ(10カ所)の脱落、ゆるみの確認。

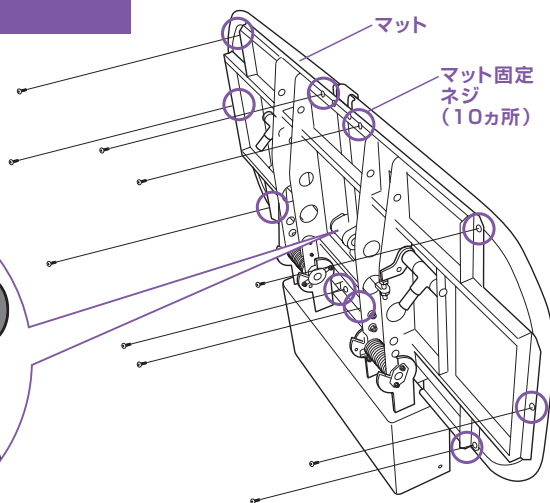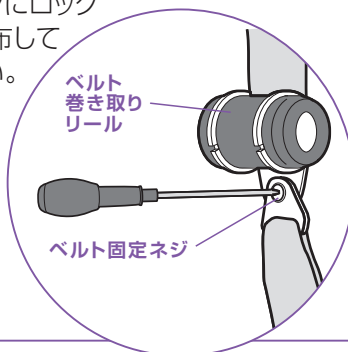


⑧組み立て

- ①本体カバーを取り付ける。

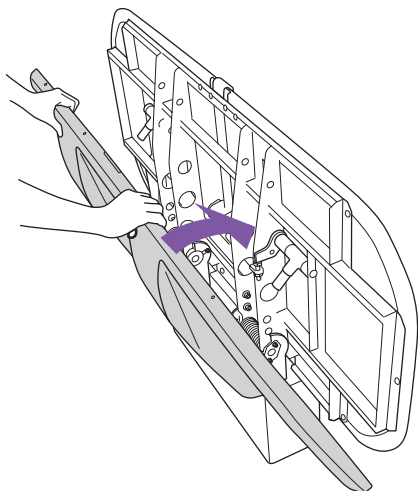


- ②本体カバーをネジ(8カ所)で固定する。

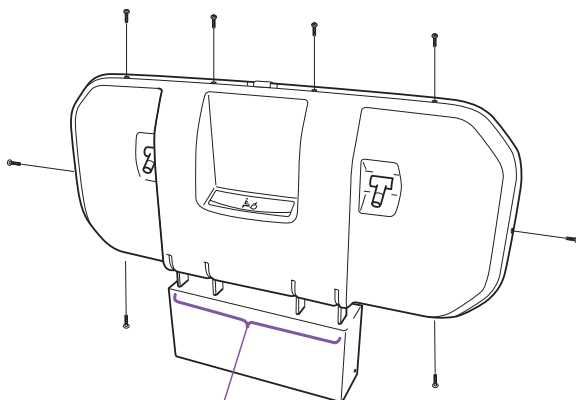


この範囲はマジックテープによる固定のためすき間がないように強くおしこむ。

- ③脚パイプを左右同時に差し込む。

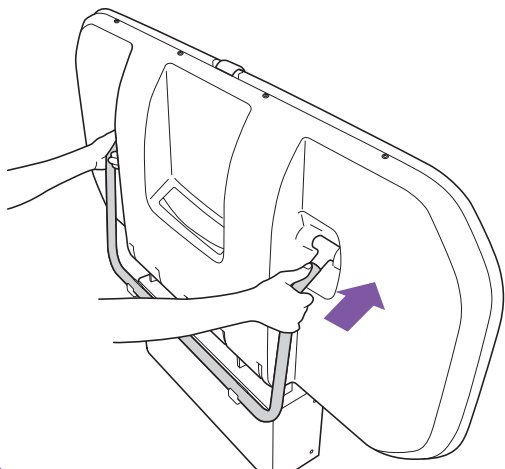

- ④脚パイプをあらかじめロックタイト(接着剤)を塗布したネジ(左右各2本、計4カ所)で固定する。

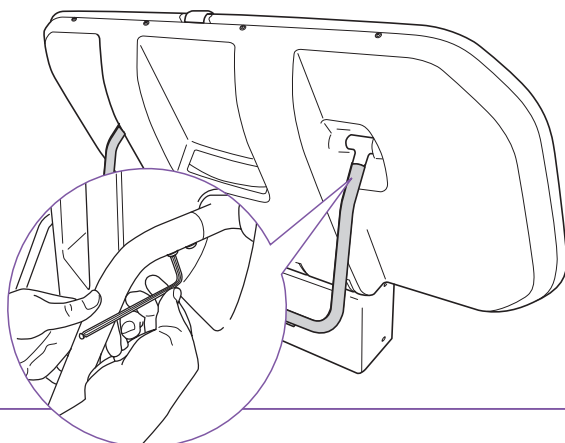


4 部品交換

ベルト・マットの交換方法


日常点検にてベルトやマットに切れ・ほつれ・ひどい汚れ等があることを発見した場合は、『交換用ベルト』『交換用マット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

1 脚パイプ固定ネジ(左右各2本、計4カ所)をはずす。


テーブルを少し開くと工具が下側から使えます。

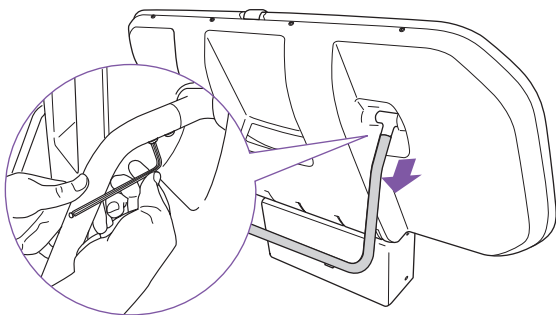


2 テーブル部を閉じ、左右同時に脚パイプを引き抜く。

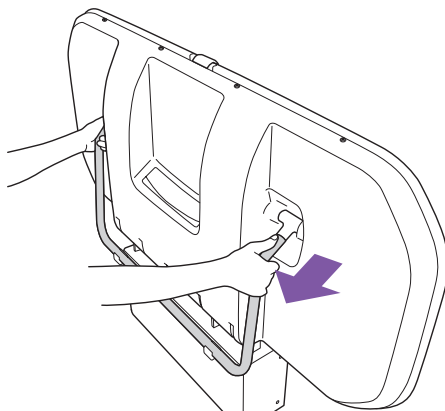


3 本体カバー固定ネジ(8カ所)をはずす。

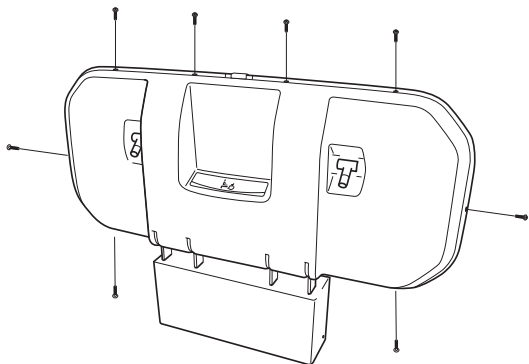

4 本体カバーをはずす。

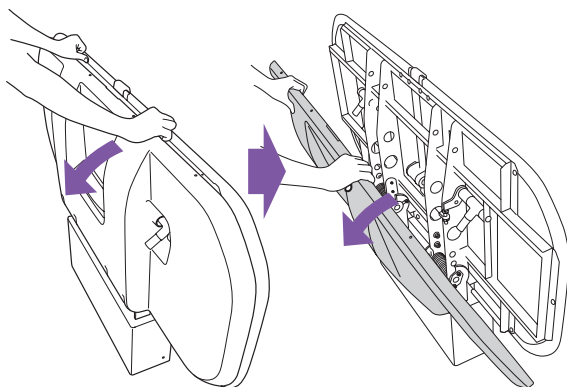


5 マットをはずす。

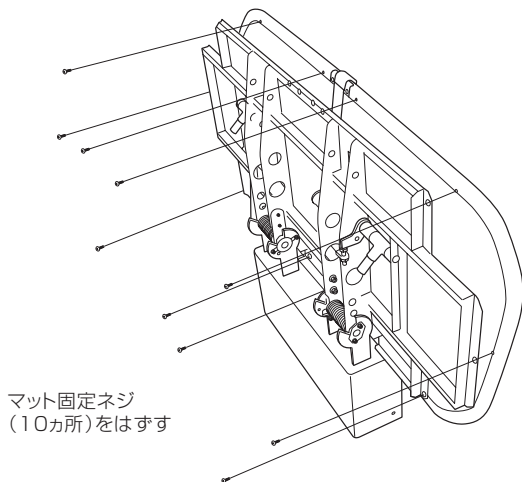


6 【ベルト交換の場合】ベルトをはずす。


ベルト固定ネジをはずし、マット表面のバックル押さえ板の通し穴からベルトを抜き取ってください。

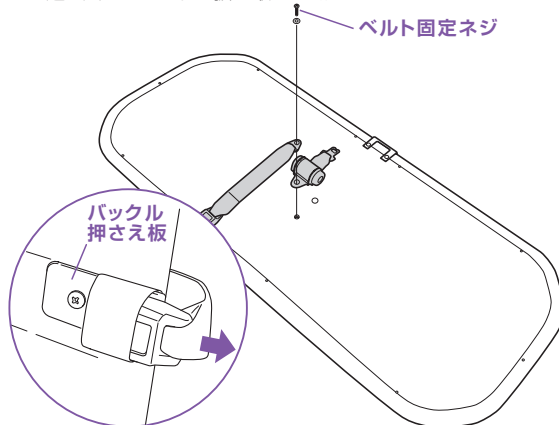


7 【ベルト交換の場合】新しいベルトをネジで固定。

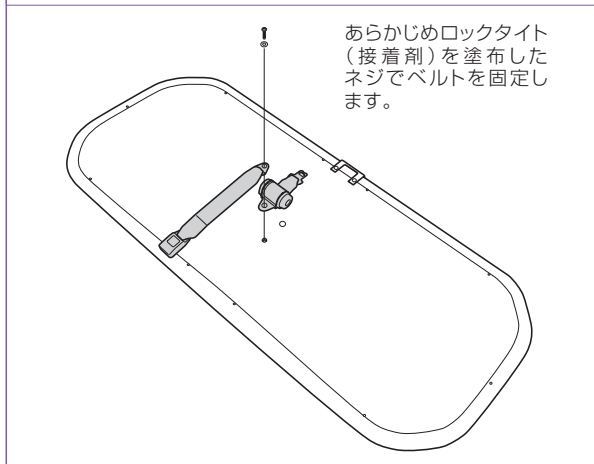


8 ベルトを数回引き出し、手を離すと収納されることを確認。

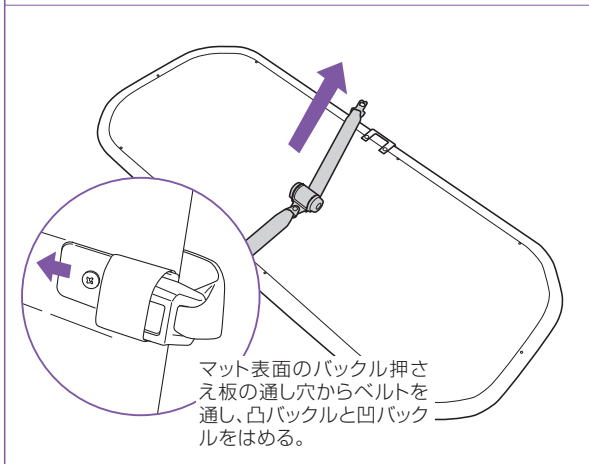


9 マットをネジ（10カ所）で固定する。

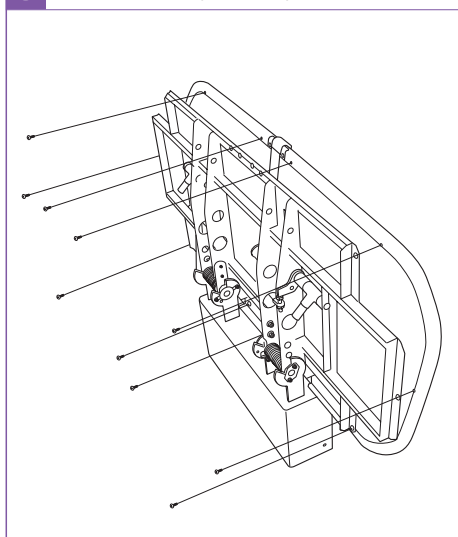

10 本体カバーを取り付け、ネジ（8カ所）で固定する。

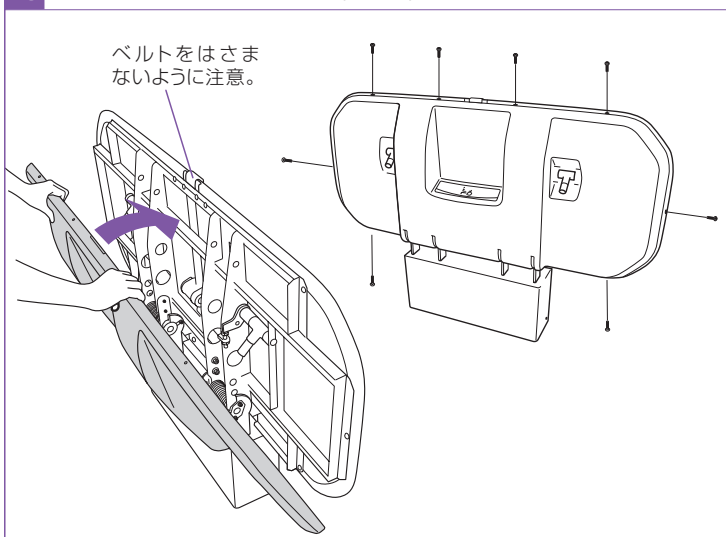


11 脚パイプをあらかじめロックタイト（接着剤）を塗布したネジ（左右各2本、計4カ所）で固定する。

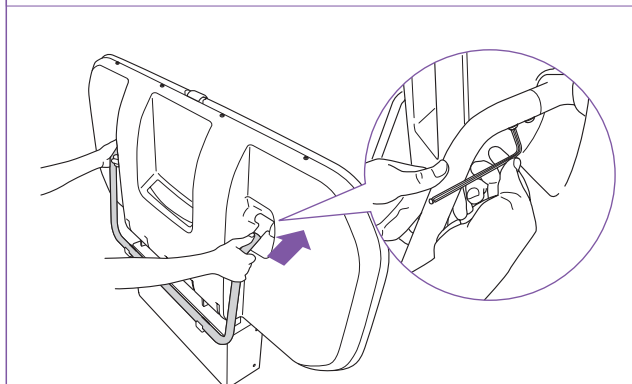

12 バックル押さえ板、通し穴バンドの交換方法

バックル押さえ板固定ネジ2本をとりはずし、交換します。

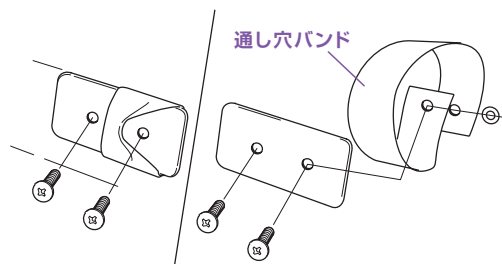

通し穴バンドのみの交換も同じです。

13 ベルト、バックルの点検

交換作業完了後、日常点検に従った点検を実施してください。

5 その他


点検日の記入

定期点検後、本誌裏表紙チェックシートその他、ベースカバー正面右上に貼付の〈点検ステッカー〉に点検日を記入してください。

また、点検ステッカー追加のご注文(有償)も承ります。

製品を安全にご使用いただくために日頃の検点と1年ごとの定期点検をお願いします。 販売元 コンビサイズ株式会社 〒200-8500 東京都千代田区千代 1-1-1 TEL:03-5806-4621 受付時間 9:00~17:00 03(5806)3000 (7/24~11)	点検年月日	点検者
	年 月 日	年 月 日
	年 月 日	年 月 日
	年 月 日	年 月 日

点検ステッカー

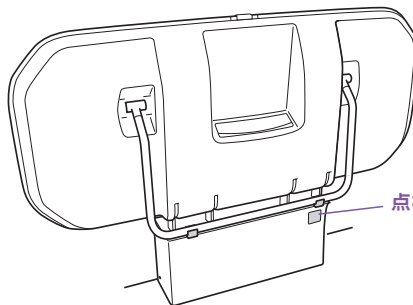

点検ステッカー

警告ステッカーについて

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、注意を促す〈警告ステッカー〉を製品の付属部品として同梱しております。

このステッカーは製品近く、かつ見やすい位置に必ず貼付してください。

追加のご注文(有償)も承ります。



警告ステッカー

清掃について

- 本品は主に障がい者や高齢者とその介助者が着替え等で使用するための台です。設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。
- 清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。



中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。プラスチックの劣化や退色、またヒビ割れが発生し破損することがあります。

ユニバーサルシート横型 日常点検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
		/	/	/	/	/	/	/
外観の確認								
部品のはずれがないこと	目視・触感							
テーブル部にガタつきがないことを、テーブル部をゆすって確認	目視・触感							
傷・割れなどがないことを確認	目視・触感							
本体の開閉動作の確認								
テーブル部を開いてガタつきがないことを、左右にゆすって確認	目視・触感							
テーブル部の開閉がスムーズであること	目視・触感							
テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位置に戻ること	目視・触感							
テーブル部を半分程度開いた際ゆっくりと開くこと	目視・触感							
ベルト・バックルの確認								
バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと	目視・触感							
ベルトのほつれ、損傷がないか	目視・触感							
バックルをカチッと音がするまで差し込み、ベルトを引っぱってはずれないこと	目視・触感							
バックルのロック・解除が確実にできること	目視・触感							
ベルトがねじれなく、スムーズに収納できること	目視・触感							
ベルトを勢いよく引くと、それ以上出ないように、ベルトがロックすること	目視・触感							
ステッカーの確認								
傷、破れ、脱落、変色がないこと	目視							
内容が読めること（汚れ、落書きなどがないこと）	目視							
点検者								
承認者								

特記事項

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、下記サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

●修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ(株) サービスセンター

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

ユニバーサルシート横型 定期点検 チェックシート

下記チェックシートの右上に年月日をご記入の上、点検を行ってください。記入した後は大切に保管してください。点検後、本体貼付の点検ステッカーにも、年月日、印をご記入ください。

必要工具等 ロックタイト(接着剤)〔当社品番97751340〕、プラスドライバー、スパナ、六角棒スパナ(幅4、幅2.5)

点検項目	点検方法	対応方法	年	年	年	年	年	年	年
			月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
ベースカバー固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	六角棒スパナ	部品交換(注)	/	/	/	/	/	/	/
アンカーボルト(4カ所)の脱落、ゆるみ	スパナ、レンチ等	部品交換(注)							
ベースフレームの錆	目視	使用中止 部品交換							
脚パイプ固定ネジ(4カ所)の脱落、ゆるみ	六角棒スパナ、 ロックタイト(接着剤)	部品交換							
本体カバー固定ネジ(8カ所)の脱落、ゆるみ	六角棒スパナ	部品交換(注)							
ベルト巻取りリールの動作確認 (動作がスムーズなこと、ベルトを勢いよく引くとロックすること)	目視・触感	部品交換							
ベルト固定ネジの脱落、ゆるみ	プラスドライバー、 ロックタイト(接着剤)	部品交換(注)							
マット固定ネジ(10カ所)の脱落、ゆるみ	プラスドライバー	部品交換(注)							
テーブル部の開閉動作がスムーズなこと (開く速度が速すぎないこと、異音がしないこと)	目視	使用中止 部品交換							
点検者									
承認者									

(注) 各部に使用しているネジは、十字穴や六角穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。ネジの締め付けは必ず手動で行ってください。接着剤が必要なネジには忘れずに塗布してください。

特記事項

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、下記サービスセンターまでご連絡・修理依頼を行ってください。

●修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ(株) サービスセンター
TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630
 電話受付時間：祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00

コンビウィズ株式会社 www.combiwith.co.jp

本社 / 東京営業所 〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7
 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
 大阪営業所 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-16
 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。
 113656190 1103 (2)